

Pantalla Facial MOD 3

Pantalla frontal de glasspack/acetato y contorno de fijación con diadema

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Fabricada en metacrilato blanco (o transparente en función del stock disponible en cada momento) con visera abatible, pensada para la protección de todos los profesionales sanitarios, médicos, policías, bomberos y empresas de servicios y comercios que tengan que seguir con su actividad mientras dure la lucha contra la pandemia del Coronavirus.

Diseñada para proporcionar una barrera de protección en el área facial y las membranas mucosas relacionadas (ojos, nariz, boca) contra salpicaduras, aerosoles y salpicaduras de fluidos corporales.

Aunque la Organización Mundial de la Salud en su Informe Situación 66 del 26/03/2020 confirma, hasta la fecha, que no hay evidencia de aerosolización en el aire con partículas que potencialmente contengan el virus COVID-19, se recomienda, especialmente en lugares cerrados, el uso adicional de otros dispositivos de protección, por ejemplo, máscaras respiratorias FFP2 o FFP3, ya que los aerosoles pueden fluir detrás de la visera.

Características: -Temperatura de uso de -40°C a 60°C. -Buena protección contra impactos leves. -Ultraligera y con buena flexibilidad. -Visión amplia: 160° y estable. -Medidas: largo 21cm; ancho 30 cm. -Reutilizable y fácilmente desinfectable. -Alta transparencia y claridad visual. -Visera abatible.

Utilización: Se recomienda lavar antes de su primer uso.

Esta referencia cuenta con una pantalla protectora de plástico rígido y traslucido que al ser

reutilizable se puede desinfectar tanto con alcohol como con agua y jabón.

Lávese las manos con agua y jabón y séquelas.

Coloque la visera sobre la cara y los ojos sin tocar el interior, de modo que la diadema se coloque cómodamente al nivel de la frente, justo por encima de los ojos.

NOTA IMPORTANTE: Preferiblemente, se deben usar guantes al retirar, limpiar y desinfectar la pantalla. Si no usa guantes y sus manos se contaminan mientras se quita el protector facial, lávese las manos inmediatamente o use un desinfectante para manos a base de alcohol. No se considera ni un EPI (EQUIPAPO PROTECCIÓN INDIVIDUAL) ni un PS (EQUIPO SANITARIO). Para más información o presupuesto kun

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.